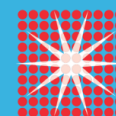


TRYB ZAAWANSOWANY – WSKAZANIA

| | WSKAZANIE | TRYB | MOC | ENERGIA | UWAGI |
|--------------|---|------------------------|-----|----------------------|----------------------------|
| Rejuvenation | <ul style="list-style-type: none"> • Wiotkość skóry • Głębsze zmarszczki | Dynamiczny | 5 W | 10-13 mJ | Przejsć 3-5 |
| | • Brązowe plamki | Dynamiczny | 5 W | 8 -12 mJ | Przejsć 1-2 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Poza twarzą • (szyja, dekolt, dłonie) | Dynamiczny | 5 W | 15-18 mJ | Przejsć 3-4 |
| BLIZNY | • Blizny po trądziku | Stacyjny Dynamiczny | 5 W | 18-20 mJ 10-15 mJ | Przejsć 1-2 Przejsć 3-4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Blizny hipertroficzne • Keloidy • Liniowe blizny atroficzne • Rozstępy | Dynamiczny | 5 W | 8-10 mJ | Przejsć 2-3 |

- ① Tryb ADVANCE włączamy dotykając pola ADVANCE.
- ② Dotknąć pola DYNAMIC aby włączyć tryb dynamiczny.
- ③ Dotknąć pola POWER lub pola ENERGY aby wybrać parametr, który chcemy nastawić. Następnie polami UP/DOWN wprowadzić żadaną wartość.
- ④ Po dotknięciu pola READY, laser zacznie generować impulsy kiedy zaczną się obracać rolki tipa na głowicy.
- ⑤ Na zbieg zalecane są minimum 4 przejścia
- ⑥ Tryb STATIC stosujemy dodatkowo, w miejscach trudnodostępnych (1-2 razy) dla trybu DYNAMIC.




ZABIEGI TYPU „SILK” – BARDZO DELIKATNIE

| WSKAZANIA | MOC | ENERGIA | TRYB | UWAGI |
|---|-----|---------|---------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa kolorytu skóry i faktury • Drobne zmarszczki | 5 W | 10 mJ | Dynamiczny / Losowy | Przejścia 3-5 Przejścia 1-2 |





Parametry zbiegów zalecanych dla poprawy kolorytu skóry i jej faktury oraz do likwidacji drobnych zmarszczek


Wskazówki kliniczne

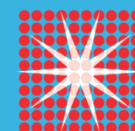- Przed zabiegiem wymagane jest zastosowanie kremu znieczulającego.
- Mikro strupki powstające po zabiegu, odpadną naturalnie po 7-10 dniach.
- Po zabiegach typu SILK można stosować wszystkie ampułki poza ampułkami VC (Wit. C).



CZTERY TRYBY PRACY
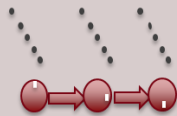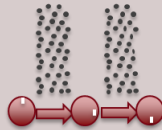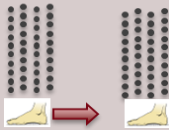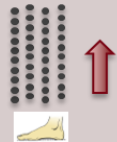
| TRYB | Dynamiczny | Losowy | Statyczny | CW |
|----------------------------------|---|---|---|--|
| Wyzwalnie | Pedał + Roler | Pedał + Roler | Tylko pedał (1-no naciśnięciu pedału jeden strzał) | Tylko pedał (ciągła emisja po naciśnięciu pedału) |
| Końcówka | Tylko Roler | Tylko Roler | Roler Tip kwadratowy Comb Tip | Roler Tip kwadratowy Comb Tip |
| Rozkład punktów na skórze | Regularny  | Losowy (CCT)  | Regularny  | Regularny ciągły  |
| Wskazania | Odmładzanie | Odmładzanie | Usuwanie zmarszczek | Włosy |

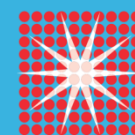

TIPY DO GŁOWICY LASEMD

| | Tip z rolkami | Tip prostokątny | Tip łączony |
|----------------------|---|--|---|
| Tips |  |  |  |
| Zastosowanie: | <ul style="list-style-type: none"> • Twarz • Poza twarzą / Ciało | <ul style="list-style-type: none"> • Twarz • Poza twarzą / Ciało | <ul style="list-style-type: none"> • zabiegi na włosach |
| Tryb pracy | <ul style="list-style-type: none"> • Dyn. / Statyczny • Losowy / CW | <ul style="list-style-type: none"> • Statyczny / CW | <ul style="list-style-type: none"> • Statyczny / CW |

Głowica LASEMD

- Magnetyczny system śledzenia ruchu głowicy bardzo przyspiesza zabieg bo dopasowuje częstotliwość impulsów lasera do szybkości przesuwu głowicy po skórze.
- Mikroskopijna wiązka (100 μm): bardziej komfortowy zabieg , bez znieczulenia i bez gojenia.
- Skanowanie metodą sterowanego chaosu (minimalne grzanie).

